

Toxo IgG/IgM Anticuerpo Prueba Rápida de Casete

(Sangre Entera/Suero/Plasma)

Ficha Técnica

REF VITGM-402	Español
---------------	---------

USO PREVISTO

Toxo IgG/IgM Anticuerpo Prueba Rápida de Casete (Sangre Entera/Suero/Plasma) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de Anticuerpo de Toxoplasma (Toxo IgG/IgM Ab) en sangre entera o suero y plasma de animal.

PRINCIPIO

Toxo IgG/IgM Anticuerpo Prueba Rápida de Casetese basa en la prueba inmunocromatográfica de flujo lateral sándwich. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) y una zona C (control) invisibles. Cuando la muestra se aplica en el pozo de la muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira de prueba. Si hay suficiente antígeno de Toxoplasma IgG/IgM en la muestra, aparecerá una línea visible en la zona IgG/IgM. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. Por este medio, el casete puede indicar con precisión la presencia del antígeno de Toxoplasma IgG/IgM en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene en su envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No utilice después de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se están probando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes

productos.

MATERIALES

Materiales Contenidos

- Casete de Prueba
- Goteros
- Búfer
- Ficha Técnica


Materiales Necesarios Pero No Contenidos

- Temporizador
- Contenedores de muestra
- Centrifugadora (sólo para plasma)

INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el búfer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.

1. Recoja sangre entera fresca de porcino, y separe el suero o el plasma de la sangre lo más pronto posible para evitar la hemólisis. Utilice únicamente las muestras claras y no hemolizadas. No deje las muestras en temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 °C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo de -20 °C.
2. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y **Transfiera 1 gota de muestra** (aproximadamente 40 µl) y inmediatamente añada **3 gotas de búfer** (aproximadamente 80 µl) al pozo de muestra (S), luego inicie el temporizador. Vea la ilustración siguiente.
3. **Lea el resultado en 5-10 minutos.** No interprete los resultados después de 15 minutos

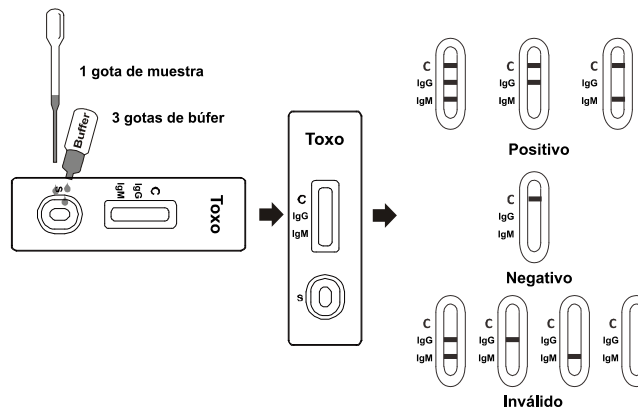

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen dos o tres líneas. Una línea de color siempre debe aparecer en la región de línea de control (C) y otra o dos líneas de color aparentes deben estar en las regiones de línea de

prueba (IgM y/o IgG).

IgM Positivo: Aparece una línea de color en la región de control (C), otra línea de color en la región IgM. Indica un resultado positivo de IgM para anticuerpos contra el toxoplasma.

IgG Positivo: Aparece una línea de color en la región de control (C), otra línea de color en la región IgG. Indica un resultado positivo de IgG para anticuerpos contra Toxoplasma.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara. No aparece ninguna línea en las regiones de la línea de prueba (IgM e IgG).

Inválido: Ninguna línea de color aparece en la región C, no importa si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

Toxo IgG/IgM Anticuerpo Prueba Rápida de Casetese es solo para el diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para obtener un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como PCR para la determinación final en la práctica.

Índice de Símbolos

	Sólo para uso diagnóstico in vitro		Pruebas por kit		No vuelva a utilizar
	Almacenar entre 2-30°C		Usar antes		# de Catálogo
	No utilizar si el paquete está dañado		Número de lote		Fabricante
	Consulte las instrucciones de uso				



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
 #550, Yin Hai Street
 Hangzhou Economic & Technological Development Area
 Hangzhou - 310018, P. R. China
 www.alltests.com.cn